

Skyla™ VB1

Analizor multiparametru

GHID RAPID DE LUCRU

■ Pornirea analizorului



■ Prepararea Probei

Sînge integral



Plasma

Ser



- * Utilizați tuburi de recoltare cu Litiu-heparină (Capac verde).
- * **NU** utilizați tuburi de recoltare cu sodiu heparină.
- * **NU** utilizați tuburi de recoltare cu EDTA.
- * După recoltare analizați proba în maxim 2 ore (păstrată la temperatura camerei).
- * Volumul probei nu trebuie să fie mai mic de jumătate din volumul tubului de recoltare.

- * Utilizați tuburi de recoltare cu Activator de coagulare (Capac auriu).

■ Analizarea probei


* Culorile capacelor tuburilor de recoltare pot fi diferite în funcție de țară.

Pasul 1: Pregătirea discului de analiză

Nota



1. Desfaceți plicul din aluminiu în zona indicată.

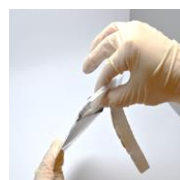


2. Extrageți discul de analiză cu 2 degete.



3. După extragere, țineți discul de analiză numai de margini.



4. Îndepărtați folia protectoare din hârtie.

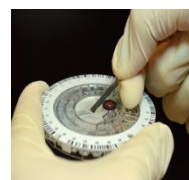


5. Îndepărtați stripul din aluminiu ce acoperă portul probei.

- * Discurile de analiză ce au fost păstrate la 2-8°C pot fi utilizate imediat, fără încălzire.
- * Nu păstrați discuri de analiză în ambalajul de aluminiu intact, la 25°C, mai mult de 48 de ore.

Pasul 2: Inserarea probei

Nota

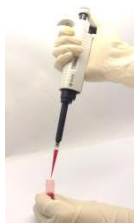


1. Utilizați pipeta și vârfulurile oferite pentru a aspira 220 µL de probă.



2. Mențineți pipeta **perpendiculară** pe suprafața discului de analiză. Apăsați pistonul pipetei cu o mișcare constantă, continuă și moderată pînă în punctul minim.

- * Cînd pipetați evitați aspirarea aerului cu vârful pipetei.
- * Vîrfurile pipetei trebuie să intre ușor în contact cu partea inferioară a camerei probei din discul de analiză. Nu apăsați cu putere pentru a nu deforma vârful pipetei.
- * După pipetarea probei în discul de analiză, mențineți pistonul pipetei apăsat pînă la extragerea completă a vârfului de pipetă din dispozitiv, pentru a evita extragerea înapoi a probei.
- * Nu apăsați repetat pistonul pipetei deoarece acest lucru poate determina eroarea de înregistrare a volumului probei.
- * Analizați discul de analiză în maxim 10 minute de la pipetarea probei în dispozitiv.

Pasul 3: Realizarea testării

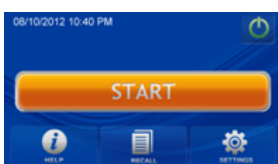


1. Pentru a deschide sertarul de încărcare a discului de analiză apăsați **START**.




2. Țineți discul de margini și așezați-l pe sertar.



3. Introduceți ID-ul Pacientului și apăsați **OK**.

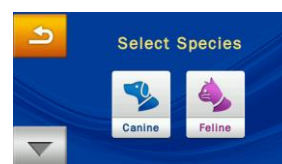


4. Selectați specia.
* Dacă ați selectat Opțiunea Report Heading, sistemul va solicita introducerea datelor despre Gen și Greutate. La final apăsați **OK**.

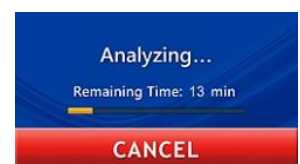


5. Sistemul va începe analiza. Mesajul: **"Analyzing..."** va fi afișat pe ecran.

Pasul 4: Rezultatele analizei

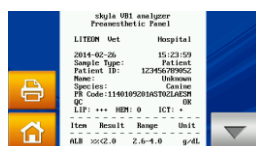

1. Sistemul va afișa automat rezultatele. Acestea pot fi printate.

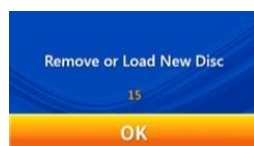

2. Apăsați **HOME** pentru a deschide sertarul și a îndepărta discul de analiză utilizat. Analiza este încheiată.



Distribuitor Național Skyla Corp. din 2017, Autorizat Pentru Vânzare, Instruire, Instalare și Service

021 269 1124
office@medv.ro

www.skyla.ro