

Test Acizi Biliari (BA Test)

Testul cantitativ acizi biliari este cel mai sensibil, cel mai ușor de operat, și cel mai specific dintre toate testele funcției hepatice.

Aplicare

1. Evaluarea funcției hepatice
2. Identificarea bolii ascunse a ficatului
3. Când valorile testului sunt normale, poate exclude șuntul hepatic
4. Monitorizarea răspunsului la tratament

- Testul Acizi Biliari este unul dintre cele mai utile teste pentru funcția hepatică. În condiții normale nivelul de acizi biliari în ser este foarte scăzut, dar în cazul unei disfuncții hepatice semnificative, sau în colestază (cele mai multe boli de ficat apar în colestază), sau în șuntul hepatic, va determina o creștere anormală a concentrației de acizi biliari în ser, mai ales după masă.
- Dacă nivelul de acizi biliari crește anormal după perioade de abținere de la mâncare, sau după mese, aceasta poate fi o indicație de șunt hepatic, sau de colestază.
- Acizii biliari din ser sunt indicatori ai funcției hepatice mai sensibili decât bilirubina sau albumina din ser; acizii biliari din ser revin de obicei la nivel normal înainte ca funcția hepatică să revină la normal.

Interpretare Rezultate Acizi Biliari

- Rezultate Postprandiale
- Rezultate Preprandiale

Unități: μ mol/L

	Rezultate Test	Retest
Rezultate Postprandiale <12	<12 Funcția hepatică este normala	
	12~25 Animal anicteric, sau suspect de disfuncție hepatică	# Reluați testarea în câteva zile/ săptămâni <input checked="" type="checkbox"/>
	>25 Suspect de declin al funcției hepatice; animal anicteric, sau suspect de disfuncție hepatică	# Reluați testarea în câteva zile/ săptămâni <input checked="" type="checkbox"/>

	Rezultate Test	Retest
Rezultate Postprandiale >25	<12 Funcția hepatică continuă să descrească	
	12~25 Funcția hepatică continuă să descrească	
	>25 Funcția hepatică continuă să descrească	

	Test Results	Retest
Rezultate Postprandiale 12~25	<12 Animal anicteric, sau suspect de disfuncție hepatică	# Reluați testarea în câteva zile/ săptămâni
	12~25 Animal anicteric, sau suspect de disfuncție hepatică	# Reluați testarea în câteva zile/ săptămâni
	< 25 Animal anicteric, sau suspect de disfuncție hepatică	# Reluați testarea în câteva zile/ săptămâni

NOTE:

- În general, valorile preprandiale > valorile postprandiale în testul BA
- Dacă rezultatele testului preprandial > postprandial, aceasta se datorează contracției spontane a vezicii biliare, sau subiectul nu a efectuat corect abținerea de la mâncare înainte de testare.
- Înainte de prelevarea de sânge, asigurați-vă că ați confirmat starea animalului înainte de mâncare (abținere) sau respectiv după mâncare, pentru a evita diagnosticul greșit bazat pe rezultate incorecte ale testelor.
- Colectarea corectă a probelelor se face astfel: preprandial, după 12 ore de abținere de la mâncare, și apoi postprandial, după 2 ore de la mâncare.